

## Oune Solucion Unica Duplo 2x360ml



Solución estéril multiuso para lentes de contacto blandas y desechables. Limpia, aclara, aseptiza, conserva.

Calificación: Sin calificación

**Precio**

6,84 €

1,19 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción

#### Descripción:

Solución estéril multiuso para lentes de contacto blandas y desechables. Limpia, aclara, aseptiza, conserva.

#### Advertencias:

Después de la apertura del frasco, no debe utilizarse pasados 90 días. Mantener el frasco bien cerrado en lugar fresco y fuera del alcance de los niños. No rozar el gotero con ninguna superficie para evitar que se contamine. En caso de irritación ocular, consultar con un especialista.

#### Modo de empleo:

Antes de manipular las lentes, lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón.

Retirar la lente del ojo, ponerla sobre la palma de la mano con unas gotas de esta solución y frotar ambas caras durante unos segundos. Aclarar la lente con la solución. Depositar cada lente en su compartimiento correspondiente y llenar el estuche portalentes con la misma solución.

Mantener las lentes al menos 4 horas, o durante la noche, sumergidas en la solución para asegurar una completa aseptización.

Una vez acabado el proceso, puede llevar la lente directamente al ojo, o aclárela previamente si lo desea. Mantener el interior del estuche portalentes limpio y renovar la solución todos los días.

**Comentarios**

Aún no hay comentarios para este producto.